

## Verticalisateur électrique pour WC R2D2



Instructions d'utilisation et de  
mise en service

1. Description
2. Sécurité
3. Utilisation
4. Entretien
5. Garantie

## **1 Description**

Félicitations pour l'achat d'un verticalisateur électrique pour WC R2D2. Vous avez opté pour un appareil qui vous rendra des services quotidiens. Ce produit a été développé et construit avec les plus hauts standards de qualité et de fonctionnalité. Toutes les pièces sont conçues pour une longue durée de vie, pour un entretien facile et écologique. Les normes et instructions ci-après accordent une place importante à la sécurité mécanique et électrique.

## **1.1 Plaque d'identification**

Fabricant: Santis Kft. Pipóhegy u. 16 H-4034 Debrecen	
Type: R2D2 Austehilfe	
N° d'appareil :	Année :
Alimentation : Un = 220 - 230 V / 50 Hz	
Ampérage: In=0,75 A	Puissance : 160 W
Indice de protection : IP20	
Poids : 50kg	Charge maxi :1,5 kN (150 kg)

## **1.2 Données techniques :**

Cotes :	Largeur 680 mm, Hauteur 630 mm, Profondeur 610 mm
Poids net :	50 kg
Sols :	Parquets jusqu'à céramique 415-720 mm
Charge sur les poignées :	1,0 kN (100 kg) Position.: Hauteur max : 650-950 mm (Y-X)
Alimentation :	230V 50Hz, 16A
Couleur :	Blanc
Poids maxi :	150 kg
Charge :	125 kg

## **1.3 Données électriques**

Verticalisation :	24 V DC, P1 = 2x 80 W
Inclinaison :	24 V DC
Touches de fonction :	24 V DC
Fusible :	3,16 A

## **2. Conseils de sécurité :**

- 2.1 Emplacement d'installation et connexion au réseau.  
L'appareil ne peut être installé que dans des zones classe 3 (Norme DIN 57100 § 701 "Salles de bains et douches"). La prise de raccordement doit être sécurisée par un raccordement à un système de coupe-circuit de protection des personnes de 30 mA, La liaison équipotentielle doit être connectée à l'endroit désigné. Ces travaux doivent être réalisés et vérifiés par un professionnel fiable.
- 2.2 La charge admissible du système de relevage R2D2 sur la lunette, tant pour le relevage que l'inclinaison :  
1,5 kN (150 kg) mesuré en dynamique
- 2.3 Ne pas exposer le capotage et les touches de fonction à un jet d'eau
- 2.4 N'utiliser que les poignées de maintien.



## **3. Instructions d'utilisation :**

- 3.1 Fonctionnement des touches : (sur le bras de droite)



1. Flèche gauche : descente
  2. Flèche droite : montée
- Le fonctionnement est continu si la touche demeure enfoncée, sinon il s'interrompt.
- 3.2 Fixation du panneau de contrôle :  
Le panneau est relié à l'appareil par un cordon dissimulé.

#### 4. Entretien

Le verticalisateur électrique pour WC R2D2 peut être entretenu avec des produits d'entretien pour les plastiques durs. Cependant il faut observer quelques précautions pour conserver l'usage et l'apparence de l'appareil.

**Le nettoyage du carénage et des bras d'appui doit se faire avec des produits du commerce pas trop abrasifs. Pas de poudres de récurage, pas de solvants**

**Pour l'utilisation de produits désinfectants, contactez nous au préalable : [courrier@easymoov.fr](mailto:courrier@easymoov.fr) en nous donnant le contenu du flacon et le détail de l'étiquette.** Aucune garantie ne sera accordée pour des réclamations suite à l'utilisation de produits de nettoyage non-conformes.




- 4.2 Ne pas utiliser le nettoyage par jet de vapeur, nettoyeur à jet d'eau haute-pression. Eviter l'eau pulsée.
- 4.3 Installer l'appareil dans des pièces hors gel et ne pas exposer directement à l'effet d'appareils de chauffage par incandescence ou à air pulsé.

#### 5. Garantie

5.3 La durée de garantie contre tous vices de fabrication est de 24 mois. Les pièces de rechange sont fournies pendant 10 ans après la date de fabrication de l'appareil, telle qu'indiquée sur la plaque.

**Attention!** Pour toute intervention, débrancher l'appareil ! Les interventions doivent être effectuées par un professionnel qualifié ou par le fabricant.

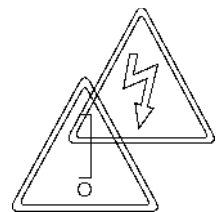



## Montage de la lunette

1



1. Sortir le support droit ou gauche de l'emballage.

2 Déconnecter les 2 supports



3. Déployer le bras

4. Boulonner



5 Fixer la lunette aux montants droit et gauche et serrer **légèrement**



## Montage de la traverse

2



1. Présenter la traverse et la visser avec les vis fournies.



2. Placer le câble dans la gorge et clipser le cache.